

Formulario de envío de Prueba DOGenes RD *

(También disponible en archivo .pdf rellenable – en formulario de nuestro sitio web.)

INSTRUCCIONES PARA RECOGER MUESTRAS

LÁVESE LAS MANOS ANTES DE TOMAR LAS MUESTRAS DE CADA ANIMAL

1. Saque un cepillo de la funda de plástico.
2. Haga girar el cepillo varias veces por la mejilla (no por las encías sobre los dientes). Esto debe durar únicamente unos **5 segundos**.
3. Deje que se seque el cepillo al aire durante **tres minutos**. Puede dejarlo en un tazón para que no toque otras superficies. Deje el cepillo

hacia arriba.

4. Meta el cepillo en el sobre que se le ha entregado.

Rellene la información que se pide en el sobre.

Prepare 3 cepillos por perro-NO VUELVA A METER LOS CEPILLOS EN BOLSAS DE PLÁSTICO

****Por favor, meta solo un cepillo en cada sobre****

LOS CACHORROS DEBEN TENER UN MES COMO MÍNIMO ANTES DE TOMARLES LAS MUESTRAS

Por favor, tenga en cuenta: Para evitar la contaminación de la comida en el cepillo, retire la comida media hora antes de la toma de muestras. Aquí se incluye también la leche materna. La comida puede inhibir la síntesis del ADN en el laboratorio. **SUS CEPILLOS DEBEN QUEDAR IMPOLUTOS TRAS LA TOMA DE MUESTRAS.**

ENVIAR los cepillos a:

DOGenes Inc.,
161 Sherin Ave.,
Peterborough, ON., K9J 7V5
CANADA

Devolver Resultados a:

Nombre:

Teléfono:

Dirección:

E-mail:

Propietario ____ Pagador ____

Número de perros enviados _____

NOTA PARA CLIENTES INTERNACIONALES:

EN LA DECLARACIÓN DE ADUANAS DEBERÁ FIGURAR: "ADN DE PERRO- NO PATÓGENO „VALOR = \$2.00

*Patente en trámite, Internacional