

Formulario de envío de pruebas genéticas DOGenes

(también disponible en línea como un .pdf rellenable – en formularios en nuestro sitio web)

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS

LÁVESE LAS MANOS ANTES DE TOMAR UNA MUESTRA DE CADA ANIMAL

1. Retire un cepillo de la bolsa de plástico.
2. Gire el cepillo en la mejilla varias veces (no en las encías por encima de los dientes). Esto solo debería tomar alrededor de 3 segundos.

3. Deje que el cepillo se seque al aire durante un minuto. Puede colocarlo en una

taza para que no toque ninguna otra superficie. Deje el cepillo hacia arriba.

4. Coloque el cepillo en el sobre proporcionado. Complete la información en el sobre.

Prepare 3 cepillos/perro-NO VUELVA A PONER LOS CEPILLOS EN LAS BOLSAS DE PLÁSTICOS

****Por favor ponga un cepillo por sobre****

LOS CACHORROS DEBEN TENER UN MES DE EDAD ANTES DE TOMAR LA MUESTRA

Tenga en cuenta: para evitar la contaminación con alimentos en el cepillo, retire los alimentos durante media hora antes de tomar la muestra. Esto incluye la leche materna. Los alimentos pueden inhibir la síntesis de ADN en el laboratorio. **SUS CEPILLOS DEBEN LUCIR IMPECABLES DESPUÉS DE LA TOMA DE MUESTRA.**

ENVÍE los cepillos a:

DOGenes Inc.,
161 Sherin Ave.,
Peterborough, ON., K9J 7V5
CANADÁ

Devolver resultados a:

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

e-mail: _____

Propietario ____ Persona que paga ____ Número de perros a procesar ____

PRUEBAS SOLICITADAS: RD _____ CDM2 _____

NOTA PARA CLIENTES INTERNACIONALES:

LA DECLARACIÓN DE ADUANAS DEBE DECIR: "ADN DE PERRO- NO PATOGENICO" VALOR = \$2.00

