

## ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL CAMPIONE

Per raccogliere il campione per l'analisi del DNA, procedere come di seguito descritto.

### LAVARE LE MANI PRIMA DI PRELEVARE IL CAMPIONE DA CIASCUN ANIMALE

1. Estrarre uno spazzolino dal sacchetto di plastica.
2. Passare lo spazzolino sulla guancia (non sulle gengive al di sopra dei denti) con movimenti circolari. Disegnare 5 giri.

3. Far asciugare lo spazzolino all'aria per due minuti. Poggiarlo in una coppetta per evitare che venga a contatto con altre superfici. Lasciare lo spazzolino rivolto verso l'alto.

4. Mettere lo spazzolino nella busta in dotazione nella confezione. Inserire le informazioni sulla busta. Scrivere il nome dei proprietari sulla busta. Se diversi dalla persona che paga il test, indicarlo.

---

### Preparare 3 spazzolini/cane – NON METTERE GLI SPAZZOLINI IN SACCHETTI DI PLASTICA

**\*\*Inserire uno spazzolino in ciascuna busta\*\***

I CUCCIOLI DEVONO AVERE ALMENO UN MESE DI ETÀ PRIMA DI POTER RACCOGLIERE IL CAMPIONE

**Nota.** Per evitare contaminazione di cibo sullo spazzolino, astenersi dal somministrare cibo per un'ora prima della raccolta del campione. Ciò vale anche per il latte materno. Il cibo può inibire la sintesi del DNA in laboratorio.

---

### INVIARE gli spazzolini a:

**DOGenes Inc.,  
161 Sherin Ave.,  
Peterborough, ON., K9J 7V5,  
CANADA**

### Restituire i risultati a:

**Email:** \_\_\_\_\_

### **GRAZIE DELL'ORDINE**

Il test è brevetto internazionale in corso di registrazione.

### NOTE TO INTERNATIONAL CUSTOMERS:

CUSTOMS DECLARATION SHOULD READ: " **DOG DNA- NON PATHOGENIC**"VALUE = \$2.00