

Test firmy DOGenes dot. dysplazji nerek

Formularz zgłoszeniowy

(dostępny także online jako plik .pdf do wypełnienia – patrz sekcja „Formularze” na naszej stronie internetowej)

INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK

PRZED KAŻDYM POBRANIEM PRÓBK OD ZWIERZĘCIA NALEŻY UMYĆ RĘCE

1. Wyjmij szczoteczkę z plastikowego woreczka.
2. Obróć szczoteczkę przy policzku kilka razy (nie przy dziąsłach powyżej zębów). Ta czynność powinna zająć około 3 sekund.
3. Zostaw szczoteczkę do wyschnięcia. Można ją umieścić w kubku lub miseczce,

tak aby nie stykała się z jakimikolwiek powierzchniami. Szczoteczka powinna być skierowana do góry.

4. Umieść szczoteczkę w dostarczonej kopercie. Uzupełnij informacje na kopercie.

Przygotuj 3 szczoteczki dla każdego psa.-NIE WKŁADAJ SZCZOTECZEK Z POWROTEM DO PLASTIKOWEGO WORECZKA.

****Należy umieścić tylko jedną szczoteczkę w kopercie**
ABY POBRAĆ PRÓBKĘ, SZCZENIAKI MUSZĄ MIEĆ CO NAJMNIJ 1 MIESIĄC**

Uwaga: Aby uniknąć zanieczyszczenia pokarmem próbek na szczoteczce, należy wstrzymać się z podawaniem pokarmu przez pół godziny przed pobraniem próbki. Dotyczy to także mleka matki. Pokarm może uniemożliwić syntezę DNA w laboratorium.
SZCZOTECZKI POWINNY WYGLĄDAĆ NIESKAZITELNIE PO POBRANIU PRÓBK.

WYŚLIJ szczoteczki na adres:

DOGenes Inc.,
161 Sherin Ave.,
Peterborough, ON., K9J 7V5
KANADA

Wyniki należy odesłać na adres:

Nazwa:

Telefon:

Adres:

E-mail:

Właściciel _____ Płatnik _____

Liczba zgłoszonych psów _____

UWAGA DLA KLIENTÓW ZAGRANICZNYCH:

DEKLARACJA CELNA POWINNA ZAWIERAĆ: „DNA PSA — NIECHOROBOTWÓRCZE” WARTOŚĆ = \$2,00